



**Інструкція з використання
мікроАЛЬБУМІН Контроль TURBI.
Ліофілізована сироватка флакон для 2 мл
IVD**

Зберігати при температурі 2- 8°C.

Характеристика

мікроАЛЬБУМІН Контроль TURBI - це ліофілізована людська сироватка. Призначена для контролю точності визначення мікроальбуміну в сечі людини турбідиметричним методом.

Склад

Людська сироватка з низьким вмістом альбуміну. Консервована. Концентрація позначена на флаконі.

Запобіжні заходи

Компоненти людського походження були перевірені і визнані негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак необхідно дотримуватися обережності, як з потенційно інфекційним матеріалом.

Підготовка до роботи

Готовий до використання

Довести до кімнатної температури протягом 30 хв. перед використанням

Неправильне використання та / або зберігання може вплинути на результат.

Неточне відновлення і помилки в техніці аналізу може призвести до помилкових результатів

Зберігання і стабільність

Контрольна сироватка стабільна до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, при зберіганні в щільно закритій упаковці при температурі 2- 8°C. Треба запобігати забрудненню під час їх використання. Не використовувати реагенти після закінчення терміну придатності або якщо є видимі ознаки мікробних наростів.

Зберігати щільно закритим, коли не використовується.

Фасовка – 1 фл по 2 мл

Каталожний номер – 49092