



## SERUM PROTEINS CALIBRATOR. Liquid serum

LOT: 26743E  
Термін дії: 2019-01  
REF: 99210

in vitro 2-8 C

### Інструкція з використання Калібратор сироваткових білків. Рідка сироватка 1,0 мл Імунотурбідиметрія

#### Характеристика

Калібратор сироваткових білків-рідка сироватка людського походження, що містить концентрації різноманітних білків, необхідних для калібрування визначень складових нижче перерахованих білків імунотурбідиметричним методом.

#### Склад

Людська сироватка. Консервована. Концентрації складових вказані в списку нижче.

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Компоненти людського походження були перевірені і визнані негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак необхідно дотримуватися обережності, як з потенційно інфекційним матеріалом.

#### КАЛІБРОВКА

Значення концентрації калібратора простежуються згідно Стандарту CRM 470/RPPHS (Інститут стандартних зразків і вимірювання, IRMM) (всі складові, крім antitrypsin III).

#### ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Закриті флакони стабільні протягом терміну дії, зазначеного на етикетці, при зберіганні в щільно закритій упаковці при температурі 2-8 C.

Запобігайте забруднення під час використання. Не використовуйте калібратор, якщо пошкоджена упаковка. Не використовуйте після закінчення терміну придатності.

Відкриті флакони стабільні протягом 30 днів при температурі 2-8 C





## SERUM PROTEINS CALIBRATOR. Liquid serum

LOT: 26743E  
Термін дії: 2019-01  
REF: 99210

in vitro 2-8 C

Білки	Метод	Концентрація (mg/dL)
$\alpha$ 1-antitrypsin	Імунотурбідиметрія	323
$\alpha$ 1 -ac. glycoprotein		216
$\alpha$ 2-macroglobulin		
Antithrombin III		97,0
C3		393
C4		75,0
Ceruloplasmin		89,0
Haptoglobin		278
IgA		608
IgG		2999
IgM		252
Prealbumin		81,0
Transferrin		819

Цей контрольний аркуш звіту застосован для частини партії. Номер серії в послідовному алфавітному порядку (наприклад А, В, С і тд). Цей продукт вироблен, упакован і протестован згідно системи контролю якості SPINREACT і відповідає всім специфікаціям продукту.

Наша Система якості була затверджена акредитованим реєструючим органом ISO 9001 та ISO 135485

### Уповноважений представник в Україні:

#### ТОВ «Лабораторія ГРАНУМ»

Україна, 61050 м. Харків,  
вул. Франківська, буд.14  
тел./факс. (057) 757-47- 17

